



ESPUMA DETERGENTE-DESINFECTANTE PARA INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO

Aniosyme Prime

PRETRATAMIENTO DETERGENTE Y DESINFECTANTE EN ESPUMA DEL INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO

- Formulación que combina dos conceptos de eficacia patentada
- Evita el secado de la suciedad
- Efecto antimicrobiano desde los 15 minutos
- Espuma densa: permite la alta cobertura del instrumental
- Amplia compatibilidad



Aniosyme Prime


Pretratamiento detergente y desinfectante en espuma del instrumental médico y quirúrgico

ÁREAS DE USO


Espuma detergente desinfectante de pretratamiento lista para usar. Indicado para una disolución optimizada de la contaminación del instrumental con tiempos de reposo más largos (hasta 72 horas) o antes del procesamiento automático.

Evita el secado de la contaminación y facilita la limpieza previa gracias a un buen efecto de limpieza. La densidad de la espuma garantiza una cobertura uniforme de la superficie del instrumental. Aniosyme Prime es compatible con una amplia variedad de materiales. No apto para instrumental de zinc o hierro.


INSTRUCCIONES DE USO

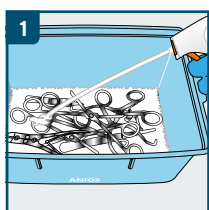


Rociar el fondo de la bandeja de remojo con Aniosyme Prime y colocar el instrumental contaminado.

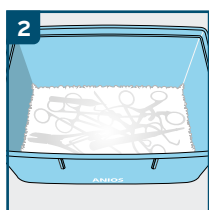

Volver a cubrir todo el instrumental con espuma. Tiempo mínimo de contacto: 15 minutos. Para actividad tuberculicida, dejar un tiempo de contacto de 30 minutos.

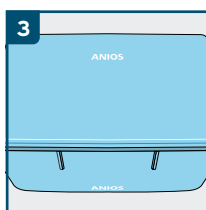

Cubrir la bandeja con una tapa.

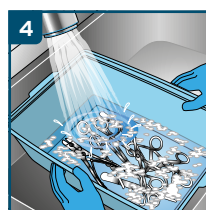

Enjuagar minuciosamente el instrumental tratado con agua del grifo para eliminar todos los restos de producto y suciedad orgánica antes de proceder con la limpieza a máquina o manual.

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

CONDICIONES	TIEMPO DE CONTACTO
Bactericida Según EN 13727 y EN 14561, condiciones sucias	15 min
Levaduricida Según EN 13624 y EN 14562, condiciones sucias	15 min
Tuberculicida Según EN 14348 y EN 14563, condiciones sucias	30 min
Micobactericida Según EN 14348 y EN 14563, condiciones sucias	60 min
Actividad frente a virus envueltos: Según EN 14476/EN 17111, condiciones sucias	15 min

INFORMACIÓN DE PEDIDO Y EMBALAJE

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
Aniosyme Prime	12 x Envases de 750ml	3133002



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuido por:
ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, S.L.
Avinguda del Baix Llobregat n.ºs. 3-5
Sant Joan Despí-08970

ÁREA DE APLICACIÓN

Pretratamiento del instrumental quirúrgico en espuma: durante el transporte en seco o durante el almacenamiento del instrumental sucio antes del lavado a máquina o manual. Mantiene un nivel de humedad adecuado para evitar que la sangre y otros materiales orgánicos se sequen.

INSTRUCCIONES DE USO

Producto listo para usar.

1. Rociar el fondo de la bandeja de remojo con Aniosyme Prime y colocar el instrumental contaminado.
2. Volver a cubrir todos el instrumental con espuma. Tiempo mínimo de contacto: 15 minutos. Para actividad tuberculicida, dejar un tiempo de contacto de 30 minutos.
3. Cubrir la bandeja con una tapa.
4. Enjuagar minuciosamente el instrumental tratado con agua del grifo para eliminar todos los restos de producto y suciedad orgánica antes de proceder con la limpieza a máquina o manual.

No utilizar en instrumental de zinc o hierro.

INGREDIENTES

Carbonato de amonio cuaternario, surfactantes no iónicos, complejo enzimático (proteasa, lipasa y amilasa), agentes secuestrantes, excipientes.

ALMACENADO

Peligro. Respetar las precauciones de uso (elaboradas según las normas Europeas de clasificación y etiquetado de los productos químicos). Almacenar entre +5°C y +25°C.

CERTIFICADOS

Producto sanitario. La actividad antimicrobiana completa del producto se recoge en el dossier de producto disponible bajo petición.

PRODUCTO SANITARIO. USAR CON SEGURIDAD

Por favor lea la etiqueta y la información de producto.



PARA USO PROFESIONAL.

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™