



ULTRA

Sistema de barrera estéril reforzada para
el embalaje de dispositivos pesados y
voluminosos y de bandejas de cirugía



- Embalaje optimizado para dispositivos médicos reutilizables en instalaciones sanitarias
- Compatible con los procesos de esterilización por vapor y peróxido de hidrógeno



ROLLOS **ULTRA**



Un revolucionario concepto de embalaje reforzado para dispositivos médicos reutilizables, que puede complementar o reemplazar el embalaje tradicional utilizado por los departamentos de esterilización de los hospitales.

Los SBE Ultra son casi irrompibles, permiten asegurar el mantenimiento de la esterilidad de los dispositivos y extender las fechas de caducidad en almacenamiento estéril.

Gracias a la innovadora idea de tener un lado poroso reforzado, este SBE ofrece mucha más resistencia a la perforación que los embalajes convencionales.

Su película transparente permite, por primera vez, visualizar el contenido de las bandejas antes de abrirlas.

PELÍCULA POROSA



SELLADO DE SEGURIDAD





Embalaje optimizado para dispositivos médicos reutilizables

Indicador de vapor, impresión intrafilm

1 lado poroso de poliolefina / 1 lado de film transparente azulado



Eficacia y resistencia durante el proceso de esterilización

La alta resistencia del sellado del embalaje ULTRA reduce considerablemente el riesgo de estallido durante la esterilización.

Esto reduce la necesidad de reprocesamiento y mejora la eficacia del proceso de embalaje de RMD.



Mantenimiento y cumplimiento de la esterilidad

La resistencia a la perforación y al rasgado del material ULTRA ofrece una integridad mucho mayor que el embalaje convencional en las fases de transporte y almacenamiento.

ULTRA cumple con las normas EN 868-5, EN ISO 11607-1 y está probado para mantener la esterilidad hasta 12 meses (embalaje simple) en un ambiente hospitalario.



Reducción de los residuos de embalajes

En comparación con un sistema de embalaje estándar con láminas, Ultra se adapta a los formatos de las bandejas de instrumentación y reduce considerablemente el volumen de los materiales de embalaje utilizados.



Transparencia y visibilidad del contenido

El lado de la película transparente de Ultra permite que los usuarios (OR) vean/ verifiquen el contenido de las bandejas quirúrgicas antes de abrirlas, sin comprometer la esterilidad.



Gran rendimiento aséptico

Sistema de fácil apertura que elimina el riesgo de desprendimiento de fibra o rasgado. El lado sintético poroso y la película de film «pelable» permiten una apertura aséptica sin emisión de partículas.



Aplicaciones del producto

Bandejas estándar (atención médica, dental).
Bandejas quirúrgicas pesadas (ortopedia).
Equipos de préstamo.
Dispositivos complejos (de corte, afilados, frágiles, robóticos).
RMD está generalmente embalado con bolsas de papel/película.



ROLLOS

Indicador de esterilización por vapor
impreso intrafilm

Código	Tamaño	Piezas por caja
GUL050X070	50mm x 70 m	5
GUL080X070	80 mm x 70 m	3
GUL120X070	120 mm x 70 m	2
GUL220X070	220 mm x 70 m	1
GUL250X070	250 mm x 70 m	1
GUL285X070	285 mm x 70 m	1
GUL320X070	320 mm x 70 m	1
GUL380X070	380 mm x 70 m	1
GUL420X070	420 mm x 70 m	1
GUL470X070	470 mm x 70 m	1
GUL520X070	520 mm x 70 m	1
GUL580X070	580 mm x 70 m	1
GUL750X070	750 mm x 70 m	1

EEE México (Matriz)

Guillermo Barroso, # 11 A Fraccionamiento Industrial las Armas, C.P.54080,
Tlalnepantla, Estado de México, México.
(52) 55 2626 5001

EEE Costa Rica

Technopark, Oficina 4 Heredia Ulloa, la Valencia,
Oficentro
+ 506 22 37 73 38

✉ info@grupoeee.com

🌐 www.grupoeee.com

EEE Panamá

Ave de la Paz, Plaza 100, Piso 3, Loc. 12, Bethania,
Urbanización El Ingenio
+507 3917 870

EEE Colombia

Aut. Medellín Km 3.4, Vía Siberia, Mód. 1, Bodega 16
+57 601 914 3393