



DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL LISTO PARA USAR

Opaster'Anios

DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA PRODUCTOS SANITARIOS

- Solución lista para usar
- Amplio espectro antimicrobiano
- Control de la conformidad del baño mediante una tira reactiva específica
- Estabilidad del baño de inmersión: 14 días




Opaster'Anios

Desinfectante de alto nivel para productos sanitarios


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Solución azul límpida
- Activo contra *Clostridium difficile*
- Solución de orto-ftaldehído al 0,55% tamponada a un pH de 7
- Amplia compatibilidad con todo tipo de materiales


INSTRUCCIONES DE USO

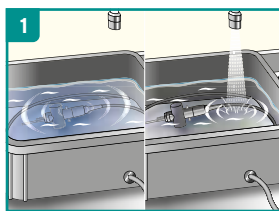


Fase de predesinfección: Limpiar el producto sanitario con un detergente o un producto predesinfectante. Enjuagar abundantemente. Para el material de endoscopia: cepillar los canales.

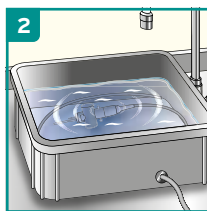

Fase de desinfección: Vierta la solución. Respetar un tiempo de contacto mínimo de 5 minutos. Mantener el baño de inmersión cubierto durante el tiempo de contacto. Para el material de endoscopia: recircular la solución por el interior de los canales. No añadir ningún producto en el OPASTER'ANIOS.

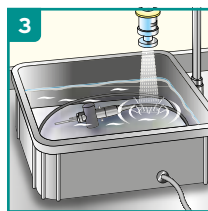

Enjuague abundantemente con agua estéril o filtrada (0,2 µm) para eliminar cualquier resto de producto. Para el material de endoscopia: las partes internas y externas del producto sanitario.

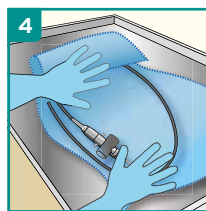

Secar con una toallita de uso único. Mantener el producto sanitario lo más aséptico posible para reutilizarlo. Para garantizar la eficacia del desinfectante.

Compruebe el nivel de orto-ftaldehído con una tira de prueba de OPASTER'ANIOS al inicio de la sesión, al recomenzar después de una interrupción y por lo menos una vez al día. Conservación máxima en el baño de inmersión: 14 días.

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

Afirmación/condiciones	Tiempo de contacto
Bactericida* según EN 13727/EN 14561	5 min
Levuricida* según EN 13624/EN 14562	5 min
Fungicida* según EN 13624/EN 14562	5 min
Tuberculicida* según EN 14348/EN 14563	5 min
Micobactericida* según EN 14348/EN 14563	5 min
Activo en virus encapsulados* según EN 14476/EN 17111	5 min
Virucida* según EN 14476/EN 17111	5 min
Esporicida* según EN 17126	30 min

*=condiciones de limpieza

INFORMACIÓN DE EMBALAJE Y PEDIDOS

Producto	Unidad de embalaje	Referencia
Opaster'Anios	4 x Envases de 5 L	2504.028
Opaster'Anios	Tiras reactivas (caja de 50)	100.110



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuido por:
LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

ECOLAB®

LABORATOIRES ANIOS
An Ecolab Company

www.ecolab.com

www.anios.com

ÁREA DE APLICACIÓN

Desinfectante de alto nivel para productos sanitarios: material quirúrgico y médico, material de endoscopia y material termosensible.

INSTRUCCIONES DE USO

Solución lista para usar. No diluir. Limpiar y enjuagar minuciosamente el producto sanitario antes de sumergirlo en OPASTER'ANIOS.

- Fase de predesinfección:** Limpiar el producto sanitario con un detergente o un producto predesinfectante. Enjuagar abundantemente. Para el material de endoscopia: cepillar los canales.
- Fase de desinfección:** Vierta la solución. Respetar un tiempo de contacto mínimo de 5 minutos. Mantener el baño de inmersión cubierto durante el tiempo de contacto. Para el material de endoscopia: recircular la solución por el interior de los canales. No añadir ningún producto en el OPASTER'ANIOS.
- Enjuague abundantemente** con agua estéril o filtrada (0,2 µm) para eliminar cualquier resto de producto. Para el material de endoscopia: las partes internas y externas del producto sanitario.
- Secar** con una toallita de uso único. Mantener el producto sanitario lo más aséptico posible para reutilizarlo. Para garantizar la eficacia del desinfectante.

Compruebe el nivel de orto-ftaldehído con una tira de prueba de OPASTER'ANIOS al inicio de la sesión, al recomenzar después de una interrupción y por lo menos una vez al día. Conservación máxima en el baño de inmersión: 14 días.

COMPOSICIÓN

Solución de orto-ftaldehído (0,55%) en medio regulado, colorante, perfume.

ALMACENAMIENTO

Peligroso: respete las precauciones de uso (redactadas según la normativa europea vigente en materia de clasificación y etiquetado de químicos). Almacenamiento: entre +5°C y +25°C.

CERTIFICACIÓN

Dispositivo médico. La actividad antimicrobiana completa de Opaster'Anios se incluye en el expediente científico, disponible a pedido.

PRODUCTO SANITARIO, USAR CON PRECAUCIÓN

Por favor, lea la etiqueta del producto para más información.



PARA USO PROFESIONAL.