

Steranios 2%



Steranios 2% y Bandelettes Steranios 2% (tiras)

Desinfectante de alto nivel

- Producto listo para usar: sin necesidad de activación previa
- Control de la conformidad de la solución desinfectante mediante tiras reactivas.




Steranios 2%

Desinfectante de alto nivel

Características

- Solución verde
- 2% solución de glutaraldehído tamponada a pH 6 (citrato sódico)
- Amplia compatibilidad con todo tipo de materiales

Instrucciones de uso

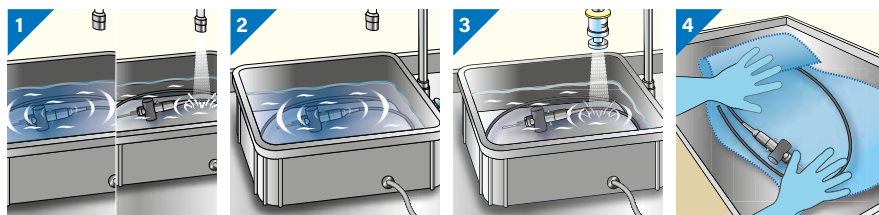

1 Fase de pre-desinfección: Limpiar el producto sanitario con un detergente o un producto pre-desinfectante. Enjuagar abundantemente.

2 Fase de desinfección: Vierta la solución. Respetar el tiempo de contacto indicado para la actividad antimicrobiana deseada. Mantener el baño de inmersión cubierto durante el tiempo de contacto. No añadir ningún producto en el STERANIOS 2%.

3 Enjuague abundantemente con agua estéril o filtrada (0,2 µm) para eliminar cualquier resto de producto. Para equipos endoscópicos: Enjuague las partes internas y externas del producto sanitario.

4 Secar con una toallita de uso único. Mantener el producto sanitario lo más aséptico posible para reutilizarlo.

Propiedades microbiológicas

Reivindicaciones de eficacia/condiciones	Tiempo de contacto
Bactericida* según EN 13727/EN 14561*	5 min
Levuricida* según EN 13624/EN 14562*	5 min
Fungicida* según EN 13624/EN 14562*	10 min
Tuberculicida* según EN 14348/EN 14563*	10 min
Micobactericida* según EN 14348/EN 14563*	10 min
Virucida* según EN 14476/EN 17111*	10 min
Esporicida frente a Clostridium difficile* según EN 17126*	60 min

*=condiciones de limpieza

Embalaje

Producto	Unidad de embalaje	Referencia
Steranios 2%	4 x envases de 5 L	3112070
Steranios 2%	Tiras reactivas de Steranios 2%	3134004

Indicaciones

Desinfectante de alto nivel de los instrumentos termosensibles y del material de endoscopia.

Instrucciones de uso

Solución lista para usar. No diluir. Limpiar y enjuagar minuciosamente el producto sanitario antes de sumergirlo en STERANIOS 2%.

1. Fase de pre-desinfección: Limpiar el producto sanitario con un detergente o un producto pre-desinfectante. Enjuagar abundantemente.
2. Fase de desinfección: Vierta la solución. Respetar el tiempo de contacto indicado para la actividad antimicrobiana deseada. Mantener el baño de inmersión cubierto durante el tiempo de contacto. No añadir ningún producto en el STERANIOS 2%.
3. Enjuague abundantemente con agua estéril o filtrada (0,2 µm) para eliminar cualquier resto de producto. Para equipos endoscópicos: Enjuague las partes internas y externas del producto sanitario.
4. Secar con una toallita de uso único. Mantener el producto sanitario lo más aséptico posible para reutilizarlo.

Para garantizar la eficacia del desinfectante, compruebe el nivel de glutaraldehído con una tira de prueba de STERANIOS 2% al inicio de la sesión, al recomenzar después de una interrupción y por lo menos una vez al día. Conservación máxima en el baño de inmersión: 30 días excepto en Francia 7 días.

Composición

Solución de glutaraldehído (al 2%) en tampón a pH 6, surfactante, colorante y excipientes.

Almacenamiento

Peligroso - respete las precauciones de uso (elaboradas según la normativa europea vigente en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos). Almacenamiento: de +5°C a +25°C.

Certificados

Producto sanitario. La información sobre la actividad antimicrobiana completa se encuentra recogida en el dossier de producto disponible bajo petición.

Producto Sanitario

Por favor leer la etiqueta del producto.

Bandelettes Steranios 2% (tiras)

Desinfectante de alto nivel

Indicaciones

100 tiras de control del índice de glutaraldehído en la solución de STERANIOS 2%.

Instrucciones de uso

- Mojar la tira durante un segundo, sacarla sacudiéndola para eliminar el exceso de líquido
- Lectura tras 15 segundos
Rosa uniforme - CONFORME
Rosa naranja - NO CONFORME
- No interpretar un resultado obtenido en más de 30 segundos tras la inmersión
- Para la frecuencia de uso, consulte las instrucciones de la etiqueta del STERANIOS 2%

Condiciones de almacenado

Volver a cerrar el tubo tras haber sacado una tira. Conservar protegido de la humedad. Respetar la fecha límite de uso indicada en la etiqueta. Conservar 90 días tras su apertura. Almacenar entre 5°C y 25°C.


Precauciones de uso

Eliminar el producto y su recipiente tomando todas las precauciones de uso. Uso reservado a los profesionales.

Lectura tras 15 segundos:


Conforme

Rosa naranja

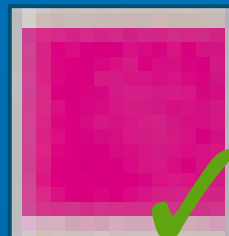

No conforme

Rosa naranja

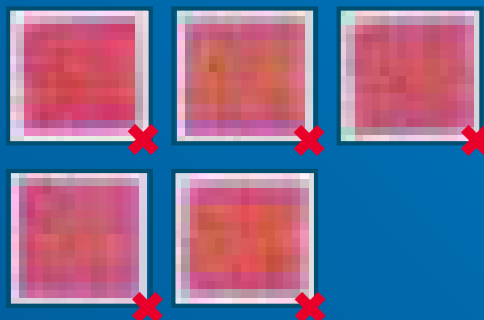

PARA USO PROFESIONAL.



LABORATOIRES ANIOS

1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuido por:

ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, S.L.

Avinguda del Baix Llobregat n°s. 3-5
Sant Joan Despí-08970

